

Epi Diaryは、下記QRコードから
アプリをダウンロードすることもできます。

iOS



【App Store の利用について】

App Store を利用するには、iTunes Store のアカウントが必要です。
※QRコードの読み取りには、QRコードアプリが必要です。
※このアプリはAndroidスマートフォンではご使用できません。

Android



【Playストアの利用について】

Playストアを利用するには、Googleアカウントが必要です。
※QRコードの読み取りには、QRコードアプリが必要です。
※このアプリはiPhoneではご使用できません。

アプリ「Epi-diary」の操作等に関するご質問・ご要望は下記のメールアドレスをご利用ください。
なお、個人的なご相談、治療など医学的なお問い合わせにはお答えできませんので予めご了承ください。

お問い合わせメールアドレス: epidiary_jp@ucb.com

※「お問い合わせ」は、ユーシービージャパンの責任で運用しております。お問い合わせの際に取得した個人情報につきましては、お問い合わせの内容にお答えするため、大塚製薬株式会社と共同利用する場合がありますが、委託業者を除く第三者に提供することはありません。その他の個人情報の取扱に関しては、各社の「プライバシーポリシー」をご参照ください。

アプリのダウンロード/インストール方法 Android版

- 

Epi Diaryは、Playストアからダウンロードできます。ホーム画面の**Playストア**をタップします。
- 


Playストア画面一番上に検索ワードが入力できます。
- 


「**Epi Diary**」と入力すると関連する語句が出てきますので、**epi diary**をタップしてアプリの情報ページに移動します。
- 

インストールをタップします。「アプリの権限」の画面が表示されますので、**同意する**をタップすると、アプリのダウンロード/インストールが始まります。
- 


ホーム画面に**Epi Diaryアイコン**が追加されます。アイコンをタップすると、アプリが起動します。
※Androidのバージョンや機種により若干異なります。


アプリのダウンロード/インストール方法 iOS版

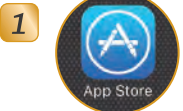- 

Epi Diaryは、App Storeからダウンロードできます。ホーム画面の**App Store**をタップします。
- 

App Store画面一番下の**検索**をタップします。すると、画面上に**検索ボックス**が現れます。
- 

検索ボックスに「**Epi Diary**」と入力すると関連する語句が出てきますので、**epi diary**をタップしてアプリの情報ページに移動します。
- 

入手をタップすると、ボタンが**インストール**に変わるので、これをタップします。アプリのダウンロード/インストールが始まります。
- 

ホーム画面に**Epi Diaryアイコン**が追加されます。アイコンをタップすると、アプリが起動します。

てんかんのある方・ご家族、介護をされている方へ

てんかん治療における 医師とのコミュニケーションに



てんかん発作日誌アプリ

エピダイアリー
Epi Diary

iOS版/Android版



Epi Diaryの機能

医師とのコミュニケーションツール

エピソードアリー


Epi Diary

- 1 毎日の状況を**記録**
- 2 ご自身の状態を**把握**
- 3 効率的に医師へと**伝える**



カレンダー

- 1か月分のレポートを共有機能
- メール送信可能
- 受診日のお知らせ機能付き

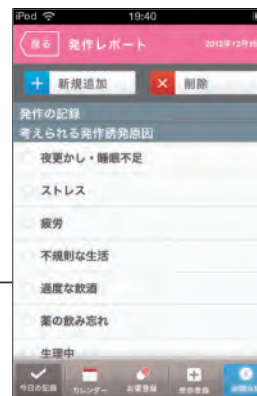

発作レポート

- 発作の型や発作誘発原因をリスト上から選択
- 自由記述も可能
- 時間・場所を簡単に記録



日常生活への影響

- 生活上できなかったことや、困難だと感じた行動を選択式で記録
- 選択肢の追加も可能



録画


- 録画ボタンを押すだけで発作レポートが起動
- 発作時の状況を録画し、ご自身の状態を効率的に医師へと伝えることが可能



服薬記録

- 飲み忘れを防止
服薬時間をアラーム機能でお知らせ
- 「のんだ」ことを簡単に記録

服薬するお薬は「お薬登録」であらかじめ登録しておきます

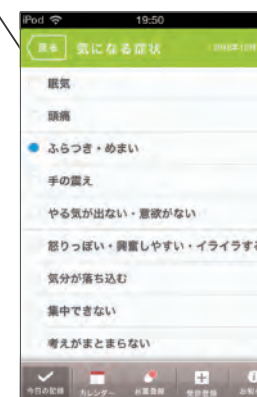

気になる症状

- 頭痛や眠気など治療において気になる症状を選択式で記録
- 選択肢の追加も可能